

חטיבת הדיאגנוסטיקה של מדטון בע"מ

מדריך להחלפת כבל אוזניות

החלפת כבל באוזניות עם קשת HB-7

1. יש לסובב את הבורג החוצה (נגד כיוון השעון), בזהירות, באמצעות מברג קטן (רגיל שטוח). את ההברגה יש לבצע סיבוב בודד ולא להוציא את הבורג לגמרי.




2. יש לשלוף את ה"מזלג" האדום/הכחול מהשקעים ולחבר את ה"מזלג" של הכבל החדש. לאחר ההחלפה, יש להבריג את הבורג פנימה (עם כיוון השעון) בזהירות ובעדינות, ולא לחזק בכוח. חיזוק בכוח יכול לגרום לשבירת הבורג ובעקבות כך לחוסר יכולת להחליף שוב את הכבל.



חטיבת הדיאגנוסטיקה של מדטון בע"מ

החלפת כבל באוזניות עם קשת Radioear 3045/3100

1. יש לשלוף את כיסויי הסיליקון מהאוזניות.

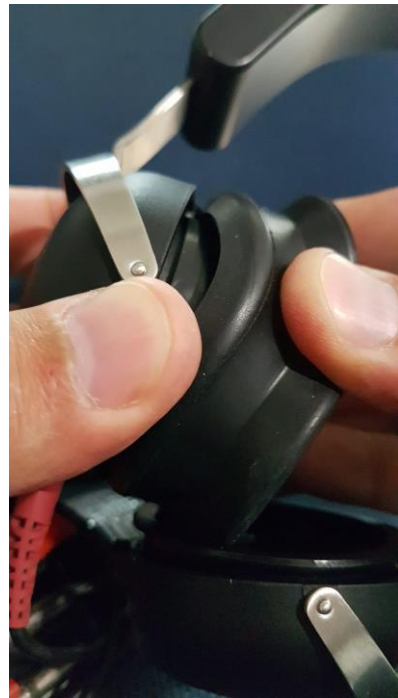

2. יש להפריד בין רמקול האוזניה לבין בית האוזניה בקשת.



חטיבת הדיאגנוסטיקה של מדטון בע"מ

3. יש לסובב את הבורג החוצה (נגד כיוון השעון), בזהירות, באמצעות מברג קטן (רגיל שטוח). את ההברגה יש לבצע סיבוב בודד ולא להוציא את הבורג לגמרי.



4. יש לשלוף את ה"מזלג" האדום/הכחול מהשקעים ומבית האוזניה, להשחיל "מזלג" של כבל חדש דרך בית האוזניה ולחבר את ה"מזלג" לשקעי רמקול האוזניה. לאחר ההחלפה, יש להבריג את הבורג פנימה (עם כיוון השעון) בזהירות ובעדינות, ולא לחזק בכוח. חיזוק בכוח יכול לגרום לשבירת הבורג ובעקבות כך לחוסר יכולת להחליף שוב את הכבל.

